

Wichtige Hinweise zur Anwendung von Thorni

Durch das Überziehen von **Thorni**, ergibt es sich automatisch das der elastische Bund vor dem **Thorni – Kragen** liegt. Die Schlaufen sollten sich nicht unter dem Bund befinden! Wenn Sie die Schlaufen nutzen möchten, so sollen sie vor dem Bund, in Richtung Kopf des Hundes liegen, das Bund hinter dem Kragen in Richtung Körper.
Sollte der Bund zu weit sein, so können Sie nun das Halsband zur Fixierung verwenden, damit gewährleistet ist, das der Kragen nicht vom Tier entfernt wird.

Thorni ist grundsätzlich für Bauch – und Kopfschutz zu verwenden, bei Pfoten- und Rutenverletzungen ist Thorni eher ungeeignet. Das muss von Fall zu Fall entschieden werden mit sorgfältiger Größenanpassung! Das ist der **WICHTIGSTE PUNKT** überhaupt, denn **Thorni** basiert auf einem völlig anderen Konzept als die herkömmlichen Leckschutzvarianten.

NICHT Der Kopf passt durch und der **Thornikragen** sitzt DAS IST GRUNDSÄTZLICH FALSCH.

☞ Es ist viel mehr so, dass der **Thornikragen** im Vergleich zum Tier **immer** sehr überdimensioniert wirkt, so sind alle Angaben von verschiedenen Merkmalen abhängig, wie lang sind die Beine, wie lang die Schnauze, wie lang der Rücken, wo ist die Verletzung und wie lebhaft ist ihr Tier.

☞ Es kann sein, dass sich ihr Tier, mit gut sitzendem Kragen, erst an das Laufen mit dem **Thornikragen** gewöhnen muss. Das geht in der Regel sehr schnell. Nimmt das Tier den Kopf runter, kann es sein dass er am Laufen behindert ist. Es wird schnell lernen den Kopf hoch zu tragen, es ist ja nur für einen meist kurzen Zeitraum bis zur Genesung. Ein krankes Tier soll ohnehin nicht toben!

☞ Um die richtige Größe zu ermitteln verfahren Sie wie die Grafik es vorgibt. Grundsätzlich gilt, der Kragen soll GUT länger als die Schnauze sein und fast bis auf die Pfoten reichen, gut den Rücken abdeckend. Im Zweifelsfall bitte einen Kragen größer verwenden, als die ausgerechneten Maße, zB: wenn der Hund sehr lebhaft ist oder die Wunde weit am Hinterkörper oder der Hinterhand sitzt.



Der Thorni Leckschutz ist in folgenden Größen lieferbar:

Größe 2 Für Hasen, Kitten oder Welpen oder sehr kleine Hunde wie Rehpinscher bis etwa 20 cm Schulterhöhe
Innendurchmesser: 7,5 cm Außendurchmesser: 25 cm

Größe 3 Für kleine Hunde, Dackel, oder Katzen bis etwa 25 cm Schulterhöhe
Innendurchmesser: 9 cm Außendurchmesser: 30 cm

Größe 4 Für kleine Hunde zB: Parson Jack Russell, Toyrassen bis etwa 33 cm Schulterhöhe
Innendurchmesser: 12 cm Außendurchmesser: 38 cm

Größe 5 Für mittelgroße Hunde wie normalgroße Beagle bis etwa 38 cm Schulterhöhe
Innendurchmesser: 14 cm Außendurchmesser: 46 cm

Größe 6 Für mittelgroße- große Hunde wie normal große Retriever oder Boxer etwa 50 cm Schulterhöhe
Innendurchmesser: 17 cm Außendurchmesser: 57 cm

Größe 7 Für große Hunde wie Schäferhund, Berner Sennenhund bis etwa 65 cm Schulterhöhe
Innendurchmesser: 20 cm Außendurchmesser: 70 cm

Thorni muss unbedingt die richtige Größe haben!!! Nur so ist dieser Kragen eine Hilfe und Erleichterung! Die richtige Größe errechnet sich NICHT nach Halsband - sondern nach Schnauzen, – Pfoten und Rückenlänge!!

Damit Sie lange Freude daran haben beachten Sie bitte Folgendes: Bitte behandeln Sie den **Thornikragen** nach den hier beschriebenen

Pflegeanweisungen. Unser Artikel ist ein Qualitätsprodukt, das bevor es unser Haus verlässt, immer überprüft wird. Da dieser Artikel dem Wohlbefinden des Tieres dient und nicht nur der Zweckmäßigkeit, sind hier verschiedene Materialien zusammengefügt, mit dem sich ihr Tier optimal erholen kann.

Diese können sich bei unsachgemäßer Behandlung verziehen, dafür können wir keine Garantie übernehmen

- Nicht in Der Waschmaschine waschen oder den ganzen Kragen in Wasser tauchen. Flecken mittels eines Schwammes und einer milden Feinwaschmittellauge ausreiben.
- Nur schonende Fein- oder Buntwaschmittel verwenden.
- KEIN Fleckenmittel einsetzen.
- Liegend, möglichst zwischen zwei Frotteetüchern trocknen. Nach dem Trocknen wieder in Form ziehen.
- Nicht bügeln
- Keine chemische Reinigung

Nur so haben Sie lange Freude an Ihrem Thornikragen
Ihr Team **Thorni**